

BRAUN

ActivScan™ 9



BUA 7200

Braun ActivScan™ 9 BUA7200

Měřič krevního tlaku v nadloktí

CZ Česky	2
DK Dansk	14
FI Suomi	26
NO Norsk	38
PL Polski	50
RU Русский	62
SA اللغة العربية	74
SE Svenska	86
TR Türkçe	98

www.hot-europe.com

Tento produkt je vyroben pod licencí značky 'Braun'. 'Braun' je registrovaná ochranná známka společnosti Braun GmbH, Kronberg, Německo. ActivScan™ je ochranná známka společnosti Helen of Troy Limited.

Slovní označení a logo The Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek podléhá licenci.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Switzerland



© 2018, všechna práva vyhrazena BUA7200CEME
P/N A000495R1 27APR18

Popis výrobku



Zamýšlené použití Braun ActivScan™ 9

ActivScan™ 9 je monitor krevního tlaku, který byl vyvinut pro přesné, pohodlné a intuitivní měření tlaku z horní části paže.

Co byste měli vědět o krevním tlaku


Krevní tlak se mění po celý den. Prudce stoupá v časných ranních hodinách a klesá během pozdního dopoledne. Krevní tlak stoupá opět v odpoledních hodinách a nakonec poklesne na nízkou úroveň v noci. Může taky kolísat během krátkého období. Proto se hodnoty z několika měření mohou lišit.

Toto zařízení zobrazí hodnotu vašeho krevního tlaku ve dvou hodnotách: systolické a diastolické. Systolický krevní tlak (vyšší číslo) určuje, jak velký tlak krev vyvíjí na cévní stěnu při tlukotu srdce. Diastolický tlak (nižší číslo) udává, jak velký tlak krev vyvíjí proti cévní stěně, zatímco srdce odpočívá mezi údery. Po každém měření se zobrazí i hodnota pulsu.

ESH (Evropská společnost pro hypertenzi) a WHO (Světová zdravotnická organizace) nastavily následující standardní hodnoty krevního tlaku. Hodnoty při měření pulsu v klidovém režimu doma:

Krevní tlak (mmHg)	Příliš nízký	Normální hodnoty	Stupeň 1 mírná hypertenze	Stupeň 2 střední hypertenze	Stupeň 3 těžká hypertenze
SYS = systola (vyšší hodnota)	pod 100	až 134	135-159	160-179	≥180
DIA = diastola (nižší hodnota)	pod 60	až 84	85-99	100-109	≥110

Pro každé měření zobrazené na obrazovce určí přiřazená barva (od zelené k červené) příslušnou úroveň krevního tlaku. Tato klasifikace vám každodenně pomůže určit váš krevní tlak. Pokud vás tato klasifikace znepokojuje, měli byste se co nejdříve poradit se svým lékařem.

Úrovně stanovené Světovou zdravotnickou organizací jsou rovněž k dispozici přímo na monitoru krevního tlaku ActivScan™ 9. Chcete-li se podívat na tabulku barev ve vašem zařízení, zvolte si záložku .

	SYS (mmHg)	and	DIA (mmHg)
Zelená >	< 135		< 85
Žlutá >	135-159	or	85-99
Oranžová >	160-179	or	100-109
Červená >	180+	or	110+

Bezpečnostní informace a důležitá upozornění

Chcete-li zajistit přesné výsledky měření, pozorně si přečtěte celý návod k použití.

Lidé trpící srdeční arytmií, zúžením cév, končetinám, diabetem nebo uživatelé kardiostimulátorů by se měli poradit se svým lékařem před samostatným měřením krevního tlaku. K odchylkám v hodnotách krevního tlaku může dojít v těchto případech.

Je-li hodnota krevního tlaku v rozsahu závažné hypertenze s hodnotami 180 mmHg

systolický a vyšší, případně 110 mmHg, diastolický a vyšší, a zjistíte, že máte jednu nebo dvě hodnoty v tomto rozsahu - prosím ihned vyhledejte svého lékaře.

Pokud jste v procesu léčby nebo užíváte léky, poraďte se nejdříve s lékařem.

Použití tohoto měřiče krevního tlaku nenahrazuje návštěvu lékaře.

Klíčová pravidla pro přesné měření krevního tlaku

Vždy měřte ve stejnou denní dobu, za stejných podmínek.











Měřič používejte nejdříve po uplynutí 30 minut od kouření, pití kávy nebo čaje nebo jakékoli námaže. Tyto faktory ovlivní měření.

Měříme vždy na stejné paži. Doporučuje se levá paže.

Umístěte manžetu do přímého kontaktu s kůží. Manžetu nepřikládejte přes sako, svetr nebo triko.


Pokud chcete provést více měření, počkejte přibližně 3 minuty před opakováním měření.

Popis výrobku (viz Strana 1)

-  Tlačítko domů (dotykové)
-  Navigační kolečko
-  Tlačítko Enter (uprostřed navigačního kolečka)
-  Tlačítko měření - srdce (dotykové)
-  Kryt prostoru pro baterie
-  Vzduchová hadice
-  Konektor
-  Displej
-  Tlačítko on/off (zapnutí/vypnutí)
-  Manžeta

Vložení/výměna baterií

- Odstraňte kryt prostoru pro baterie vodorovným posunutím doleva. Vložte čtyři baterie dodané s tímto produktem, s umístěním polaritý tak, jak je uvedeno v prostoru pro baterie. Při výměně baterií použijte výhradně alkalické baterie, typ AA/LR6, 1.5V.
- Nové baterie vydrží přibližně 350 měření.
- Při výměně baterií, všechny hodnoty uložené v paměti jsou zachovány, ale datum a čas musí být znovu nastaveny.

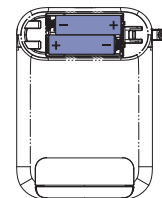

Základy

Tlačítko On/Off: nachází se v horní části zařízení.

Tlačítko domů: Když je návrat domů k dispozici, tato ikona bude svítit. Jednoduchým dotykem nebo klepnutím na toto tlačítko přejdete zpět na domovskou obrazovku menu.

Navigační kolečko: otočte tímto ovladačem doleva nebo do prava pro výběr různých funkcí, jejichž výběr potvrdíte stisknutím tlačítka uprostřed (tlačítko Enter).

Tlačítko měření - srdce: Když svítí, dotknutím se tohoto tlačítka nebo klepnutím na něj spustíte měření.

Ikony nabídky

	Měření	Vyberte tuto funkci a stiskněte enter pro měření. Tato funkce je stejná jako tlačítko měření - srdce (D)
	Historie	Volbou této funkce zobrazíte historii a vývoj hodnoty krevního tlaku v barevném grafu
	Zobrazení kalendáře	Volbou této funkce zobrazíte vaše hodnoty krevního tlaku měsíc po měsíci s vybarvenými denními průměry
	Reporty	Volbou této funkce zobrazíte průměrné hodnoty krevního tlaku za 7/14/30 dní
	Uživatelé	Volbou této funkce vyberete, přidáte, upravíte nebo odstraníte uživatele
	Nastavení data a času	Volbou této funkce nastavíte datum a čas v zařízení
	Nastavení	Vyberte tuto funkci, pokud chcete povolit/zakázat animace při načítání nebo povolit/zakázat uživateli výběr při zapnutí
	Párování s Bluetooth®	Vyberte tuto funkci pro spárování vašeho zařízení s aplikací Braun Healthy Heart
	Informace	Vyberte tuto funkci pro získání více informací o barevné tabulce krevního tlaku a jak správně měřit krevní tlak

Nastavení data a času


Datum a čas musí být nastaveny před tím, než provedete měření.

Je důležité správně nastavit datum a čas, aby bylo zajištěno, že hodnoty jsou zobrazeny správně v tomto zařízení i v aplikaci Braun Healthy Heart.

Tato obrazovka se zobrazí automaticky při prvním použití zařízení nebo po vložení nové sady baterií.

Pokud potřebujete posunout datum a čas (např. při posunutí času o jednu hodinu v létě), pak můžete pro přístup k této obrazovce z hlavní nabídky využít ikony datum a čas


Zvolte formát (EU nebo US) a pak datum a čas otočením kolečka. Stisknutím tlačítka Enter aktivujete pole. Pokud pole bliká, můžete nastavovat čísla. Stisknutím tlačítka Enter potvrďte zadané číslo a kurzor přeskočí na další pole. Postup opakujte. Po dokončení potvrďte výběrem ikony "Uložit"

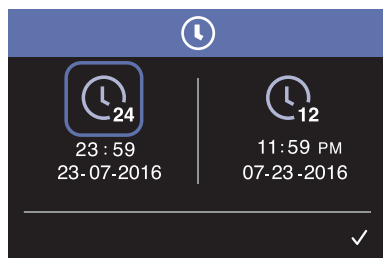

Nastavení uživatelského jména

V hlavní nabídce vyberte uživatele a stiskněte klávesu Enter. Nyní vyberte písmena otočením navigačního kolečka a každé písmeno potvrďte stisknutím tlačítka Enter. Po dokončení vyberte ikonu Uložit a stiskněte klávesu Enter. Jména lze kdykoli změnit výběrem ikony uživatele v hlavní nabídce.

Při vyjmutí nebo výměně baterií nedojde ke ztrátě uživatelského jména.

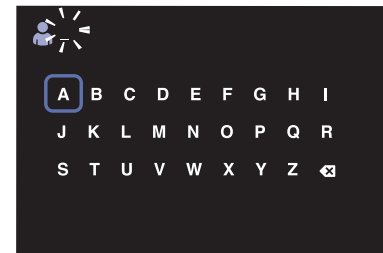

Správné držení těla a umístění manžety

Správné držení těla během měření je důležité pro získání přesných údajů. Pro větší přesnost doporučujeme používat levou ruku, protože je blíže k srdci.


Správné umístění manžety by mělo být 2-3 cm nad loktem, kdy vyústění trubice směřuje k vaší ruce a vede podél středu vnitřní strany vašeho lokte, manžetu zavřete pomocí upínáku Velcro tak, aby byla na paži upnutá pevně, ale pohodlně. Mezi manžetou a vaší paží by neměl být volný prostor.

ActivScan™ 9 zobrazuje na obrazovce animace, které vám pomohou dosáhnout správného držení těla a správného nasazení manžety. Tato pomocná funkce měření se zobrazí automaticky při prvním použití zařízení a následně může být zobrazena před každým měřením stisknutím ikony Nastavení

Animovanou pomůcku na obrazovce lze zobrazit kdykoliv zvolením ikonky Informace v hlavním menu.

Měření krevního tlaku

1. Sedněte si, uklidněte se, nehybejte se (zejména paží, na které provádíte měření), nemlouvejte. Během měření nepřekřížujte nohy a chodidla mějte na podlaze.
2. Manžetu nasadte 2-3 cm nad loktem, s vyústěním trubice ve směru ruky a podél středu vnitřní strany vašeho lokte.
3. Pro zahájení měření se dotkněte ikony měření - srdce nacházející se nalevo od kolečka nebo zvolte tlačítko srdce v hlavní nabídce. Měření se spustí po 3 sekundách odpočítaných na obrazovce. Měření je možné kdykoli přerušit dotknutím se tlačítka Domů nebo tlačítka Enter.

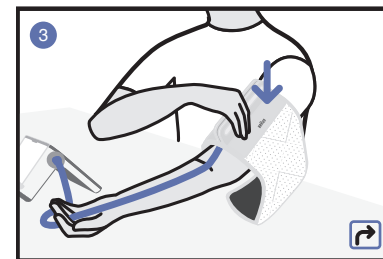

Pochopení hodnoty


Po dokončení měření jsou hodnoty zobrazeny na obrazovce spolu s barevným obrázkem srdce. Obrázek srdce a barva pozadí bude označovat úroveň hypertenze z výsledku. Pro výklad hodnoty použijte níže uvedenou tabulku.

SYS: ukazuje hodnotu pro systolický krevní tlak

DIA: ukazuje hodnotu pro diastolický krevní tlak

♥ Zobrazí puls (tep)

♥ Tato ikona se zobrazí, pokud je srdeční tep nepravidelný. Nepravidelný srdeční tep může být způsoben mluvením, pohybem nebo třesem během měření. Obvykle to není důvod k obavám. Nicméně pokud se symbol objevuje často i při striktním dodržování těchto pravidel, pak byste měli vyhledat lékaře.

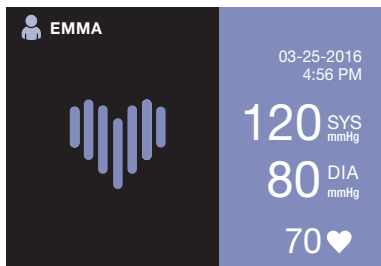

	Zelená: normální krevní tlak	Váš krevní tlak je normální a hodnoty jsou nižší než 135 mmHg systolického tlaku a nižší než 85 mmHg diastolického.
	Žlutá: mírná hypertenze	Výsledek měření krevního tlaku je v oblasti mírné hypertenze s hodnotami mezi 135-159 mmHg systolického tlaku nebo 85-99 mmHg diastolického.
	Oranžová: střední hypertenze	Výsledek měření krevního tlaku je v oblasti střední hypertenze s hodnotami mezi 160-179 mmHg systolického tlaku nebo 100-109 mmHg diastolického.
	Červená: těžká hypertenze	Výsledek měření krevního tlaku je v oblasti těžké hypertenze s hodnotami od 180 mmHg systolického tlaku nebo 110 mmHg diastolického. Jestli je váš výsledek v tomto rozsahu, ihned se poraďte se svým lékařem.


Paměťová funkce

Váš ActivScan™ uloží až 200 měření pro každého uživatele. Naměřené hodnoty jsou automaticky uloženy při dokončení měření. Po dosažení 200 naměřených hodnot nové hodnoty automaticky nahradí ty nejstarší. Doporučujeme vám pravidelně přenášet vaše uložené hodnoty do aplikace Braun Healthy Heart na vašem telefonu, abyste mohli snadno sledovat vývoj vašeho krevního tlaku po delší časové období.

Paměť je stálá. Uložené údaje nebudou ztraceny ani při výměně baterií.

Zkontrolujte průměr vašich hodnot

Zobrazte si průměry z vašich měření jako report, zvolením ikony Report v menu. Tato funkce poskytuje průměry za posledních 7, 14 nebo 30 dní z měření ráno (vlevo), večer (uprostřed) a po celý den (vpravo). Celkový počet hodnot získaných během časového období se zobrazí v dolní části a je zobrazen jako 14

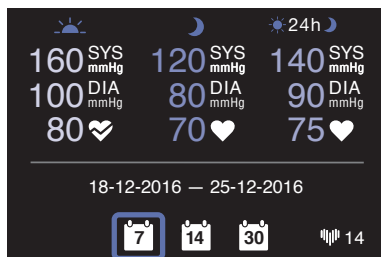

Kontrola průměrných hodnot lépe přibližuje vaše celkové kardiovaskulární zdraví.

Ujistěte se, že si měříte tlak pravidelně, aby hodnoty přesněji odrazily vaše celkové kardiovaskulární zdraví.



Odkazuje na měření ráno od 4:00 do 09:59

Odkazuje na měření večer mezi 19:00 a 01:59 (na druhý den)



Se týká všech měření provedených během dne, mezi 00:00 do 23:59

Sledování vývoje vašeho krevního tlaku

Výběr ikony Historie v menu umožní přístup k přehledu o údajích o krevním tlaku ve formě sloupcového grafu.

Každý barevný sloupec představuje jediné čtení. Zvolte si barevný sloupec přesunutím modře vybarveného boxíku pomocí navigačního kolečka. Podrobnosti o vybraných hodnotách se zobrazí v dolní části sloupcového grafu. Každá barva sloupce je v souladu s pokyny WHO uvedené na straně 2.

♥ Tato ikona označuje měření pulsu.

♥ Tato ikona se zobrazí, pokud byl během měření zaznamenán nepravidelný srdeční tep.



Nepravidelný srdeční rytmus se vám také zobrazí na sloupcovém grafu jako přerušovaný sloupec.

Odstranění výsledku


Výsledky je možné selektivně odstranit z historie. Takové výsledky budou odstraněny i ze všech ostatních náhledů a nebudou převedeny při dalším spojení s aplikací Braun Healthy Heart.

Vybete si jeden výsledek na sloupcovém grafu a stisknete tlačítko Enter: zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o výsledku a malé ikony v dolní části pro odstranění tohoto výsledku.

Chcete-li odstranit výsledek, vyberte symbol koše a pak stisknete tlačítko Enter. Pro zrušení vyberte symbol zpět a stisknete tlačítko Enter.

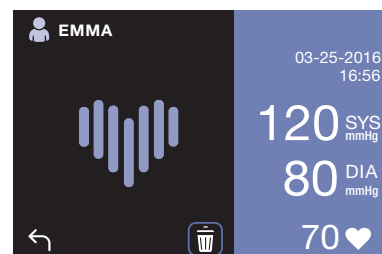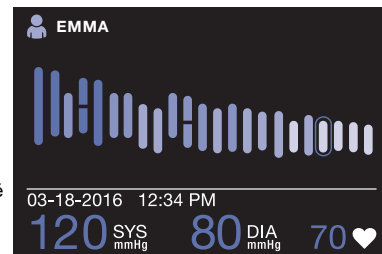


Zobrazení kalendáře

Výběrem ikony kalendáře  v menu se zobrazí váš denní průměr měsíc po měsíci. Měsíc a rok jsou zobrazeny v horní části obrazovky.


Týden začíná pondělím nalevo; Sobota a neděle jsou napravo od šedé čáry.

Dny s naměřenými hodnoty jsou zobrazeny v barvě denního průměru (viz graf WHO na str. 2) a podrobnosti o konkrétním denním průměru jsou zobrazeny na pravé straně.

Navigujte mezi dny měsíce použitím navigačního kolečka. Měsíce můžete rychle procházet přechodem na první (poslední) den v měsíci a pak přeskočíte na předchozí (další) měsíc a tak dále.

V horní části obrazovky malá ikona srdíčka následovaná číslem  2 odkazuje na počet hodnot, které byly pořízeny ve vybraný den.


Všechna měření pro vybraný den zobrazíte kliknutím na tlačítko Enter. Malé srdíčko nahoře bude označovat naměřená čísla  1/2 . Kliknutí na tlačítko Enter vás přesune na další měření.

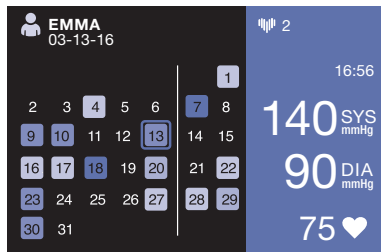

Párování s Bluetooth®


ActivScan™ 9 je kompatibilní s aplikací Braun Healthy Heart.

Ujistěte se, že aplikace Braun Healthy Heart byla do telefonu stažena a je otevřena.

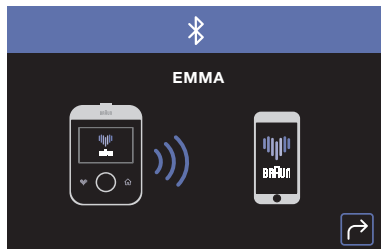


Chcete-li přístroj spárovat s aplikací Braun Healthy Heart na vašem telefonu, vyberte ikonu Bluetooth  v menu vašeho ActivScan™ 9.

Zapněte funkci Bluetooth v telefonu. Při prvním použití aplikace Braun Healthy Heart, postupujte dle pokynů na obrazovce pro spárování zařízení. Aplikace i zařízení zobrazí průběh připojování.

Když se váš ActivScan™ 9 úspěšně spáruje, na obrazovce se zobrazí zelená značka .

Pokud chcete spárovat další zařízení s vaším telefonem, přejděte k části "Připojení zařízení" v aplikaci a postupujte podle pokynů.

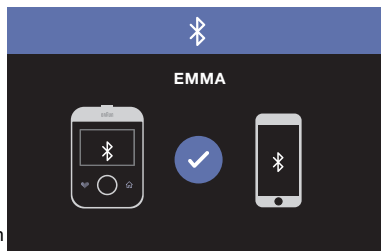



Přidávání, editování a mazání uživatelů


Přidání druhého uživatele je nezbytné, pokud chcete sdílet tento měřič krevního tlaku s jinou osobou. Každý uživatel bude mít vlastní paměť a uložené průměry.

Chcete-li přidat druhého uživatele, vyberte ikonu uživatelů  v menu a následně vyberte ikonu Přidat uživatele. .

Pokud jste již vytvořili dva uživatele, vyberte uživatele výběrem odpovídající oranžové nebo modré ikony; uživatelské jméno se zobrazí pod ikonou.

Po výběru potvrďte uživatele zaškrtnutím. Můžete upravit jméno uživatele  nebo odstranit uživatele  pomocí malých ikon v dolní části obrazovky.

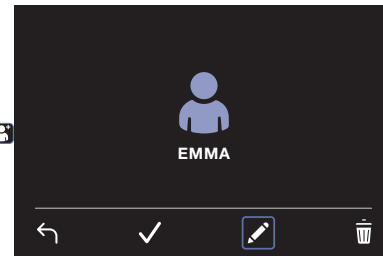

Upozornění: odstranění uživatele odstraní všechny hodnoty krevního tlaku a průměry pro daného uživatele, stejně tak dojde k odstranění uživatelského jména.




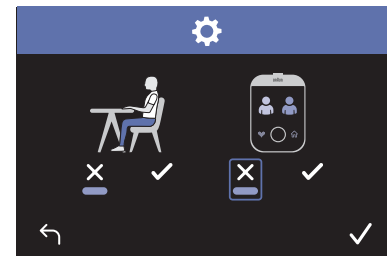
Nastavení

Váš ActiveScan™ 9 lze přizpůsobit dle vašich preferencí. První možnost povolí nebo zakáže animované pokyny, které jsou zobrazeny před zahájením měření krevního tlaku.

Druhá možnost povolí nebo zakáže výběr uživatele při zapnutí. Tato možnost má efekt pouze, když jsou na zařízení aktivní dva uživatelé.

Zaškrtněte  pro povolení možnosti; Vyberte křížek , chcete-li zakázat možnost a potvrďte možnost tlačítkem Enter.


Uložte nastavení výběrem velkého zařízení  a stiskněte tlačítko Enter.



Informace

Získání informací o barevném kódování používaném pro zobrazování výsledků měření. Toto barevné kódování se řídí pravidly Světové zdravotnické organizace.

Zde také vidíte animovaný návod jak dočíst přesného měření krevního tlaku.

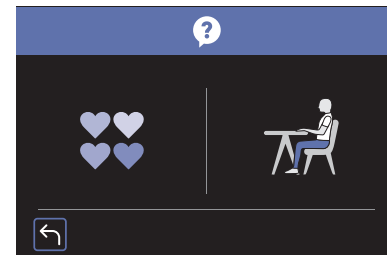

Indikátor životnosti baterie



Baterie jsou slabé

Když jsou baterie přibližně z 80 % vybité, zobrazí se asi na 6 vteřin při zapnutí symbol baterie. Symbol nízké baterie se pak zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Vaše ActivScan® 9 zařízení bude nadále měřit spolehlivě, ale měli byste si pořídit novou baterii.



Baterie jsou vybité - výměna nutná

Když jsou baterie zcela vybité, symbol prázdné baterie se zobrazí po dobu asi 6 sekund při zapnutí a pak se zařízení automaticky vypne. Nelze naměřit žádné hodnoty a baterie je nutné vyměnit.

Čištění a skladování

- Neumísťujte/nenechávejte předmět na přímém slunečním světle, ve vysokých teplotách nebo na vlhkých a prašných místech.
- Neskladujte ve velmi nízkých (méně než -20 °C) nebo vysokých (více než 55 °C) teplotách.
- Pro čištění krytu používejte vlhký hadřík nebo jemný čistící prostředek a poté jej vytřete do sucha.
- Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.
- Když jednotku nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. (Baterie mohou vytéct nebo způsobit škodu).
- Neupravujte zařízení. Přístroj nikdy neotvírejte! Zruší to platnost vaší záruky.

Kalibrace

Toto zařízení bylo kalibrováno při výrobě. Pokud se používá podle návodu k použití, není nutná další předchozí kalibrace.

Záruka

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny. Uchovejte si doklad jako důkaz o datu nákupu. Účtenka musí být předložena při reklamaci v rámci příslušné záruční lhůty. Veškeré reklamace v rámci záruky nebudou uznány bez dokladu o koupi.

Na vaše zařízení se vztahuje záruka o délce dva roky (2 roky) od data zakoupení.

Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo zpracování, které se vyskytují při běžném používání; vadná zařízení splňující tato kritéria bude nahrazena bezplatně.

Záruka nekryje vady nebo škody způsobené zneužitím nebo nedodržáním pokynů uživatele. Záruka zaniká, pokud je přístroj otevřen, je s ním nevhodně manipulováno, nebo se používají neznámkové díly nebo příslušenství, nebo pokud opravy provádí neoprávněné osoby.

Na příslušenství a spotřební materiál se záruka nevztahuje.

Pro podporu navštivte www.hot-europe.com/support nebo použijte kontaktní informace na konci tohoto návodu k obsluze.

Tato záruka platí pouze pro Evropu, Střední východ a Afriku.

Číslo šarže a SČ zařízení jsou vytištěny na typovém štítku na zadní straně produktu.

Poradce při potížích

Problém	Důvod	Řešení
	Upozornění na slabou baterii	Baterie jsou slabé. Připravte se na brzkou výměnu baterií.
	Upozornění na vybitou baterii	Upozorňuje, že baterie je zcela vybitá. Vložte nové baterie nebo zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
Zařízení není možné zapnout, obrazovka je černá	Problém s baterií	Vyměňte baterie za nové a ujistěte se, že jsou správně vloženy. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na zákaznickou podporu
 ERROR BLUETOOTH	Nelze se připojit k chytrému telefonu	Držte se dál od zdrojů vysokofrekvenčního rušení, jako jsou mikrovlnné trouby, WiFi routery, přenosné počítače, atd... Před zahájením párování se ujistěte, že Bluetooth je na vašem telefonu zapnutý. Postupujte podle pokynů pro párování zařízení Bluetooth v aplikaci Braun a znovu inicializujte Bluetooth párování pomocí aplikace Braun.
 ERROR 0	Chyba měření	Pulsové vjemy na manžetu jsou příliš slabé. Změňte pozici manžety a opakujte měření.
 ERROR 1	Chyba nafukování	Manžeta není řádně upevněná. Změňte pozici manžety a opakujte měření.
 ERROR 2	Chyba překročení rozsahu výsledku	Na chvíli si odpočiňte a měření opakujte. Ujistěte se, že je manžeta správně umístěna na paži.
 ERROR 3	Chyba doby nafukování	Manžeta není řádně upevněná. Nasadte manžetu a proveďte měření znovu.
 ERROR 254	Interní chyba zařízení	Vyjměte a znovu vložte baterie. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na zákaznickou podporu.
 ERROR 255	Chyba kalibrace	Vyjměte a znovu vložte baterie. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na zákaznickou podporu.
 ERROR FIRMWARE	Objevila se chyba během aktualizace firmwaru Bluetooth	Zařízení se automaticky restartuje při použití původního firmwaru Bluetooth. Znovu zahajte proces stahování firmwaru nebo postupujte podle pokynů na obrazovce Braun APP.

Specifikace

Číslo modelu	BUA7200
Metoda měření	Oscilometrická
Rozsah měření krevního tlaku	40 ~ 255 mmHg
Rozsah měření pulsu	40 ~ 199 tepů/min
Přesnost kalibrace	Krevní tlak: +/- 3 mmHg Puls: +/- 4% udávané hodnoty
Inflace/deflace	Automatická
Displej	Barevný TFT displej
Sady paměti	Až 200 měření na uživatele
Velikost manžety	Univerzální manžeta: obvod paže 22-42 cm (9-17 inch) min/max
Provozní teplota	+10 °C ~ + 40 °C, menší než 85 % R.H., bez kondenzace
Skladovací teplota	-20 °C ~ +55 °C, menší než 85 % R. H., bez kondenzace
Hmotnost jednotky	610g (bez baterií)
Napájecí zdroj	Alkalické baterie: 4 x AA (LR6) 1.5V
Automatické vypnutí	Cca 60 sekund
Životnost	5 let
Bezdrátová komunikace	Bluetooth® Smart Frekvenční rozsah: 2.4GHz ISM pásmo (2400 - 2483,5 MHz) Modulace: GFSK Efektivní vyzářený výkon: <20dBm



Důležité



Přečtěte si návod.

Pokud není zařízení používáno v rámci určené teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku, nelze zaručit technickou přesnost měření.

Klasifikace:



Interně napájené zařízení
Použité části typu BF

IP22 Chráněno proti pevným cizím předmětům o průměru 12,5 mm a větším.
Chráněno proti svisle kapajícím vodním kapkám, při náklonu zařízení až do úhlu 15°.

Není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným.

Nepřetržitý provoz s krátkou dobou načítání.



Provozní teplota



Skladovací teplota



85
Skladovací vlhkost

Změny bez předchozího upozornění.

Toto zařízení splňuje následující normy:

EN 60601-1:2006 / A1:2013 - všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon

EN 60601-1-2:2015 - zdravotnické elektrické zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - požadavky a zkoušky.

EN 60601-1-11:2010-zdravotnické elektrické zařízení - požadavky na zdravotnické elektrické zařízení a zdravotnické elektrické systémy používané v domácím prostředí zdravotní péče.



Tento výrobek splňuje ustanovení z EC směrnice 93/42/EHS (Lékařská Směrnice Zařízení).

Tento produkt nese označení CE a je vyráběn v souladu s RoHS směrnicí 2011/65/EU.

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE vyžadují zvláštní opatření týkající se EMC.

Pro podrobný popis EMC požadavků se prosím obraťte na místní autorizované servisní středisko (viz záruka) nebo navštivte www.hot-europe.com/support.

Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou ovlivňovat elektrické zdravotnické prostředky.



Tento výrobek obsahuje baterie a recyklovatelný elektronický odpad. Za účelem ochrany životního prostředí nevyhazujte zařízení do domovního odpadu, ale odneste jej do místního sběrného střediska.

Kontaktní čísla podpory

Austria

☎ +43 (0)1 360 277 1225

Bahrain

☎ +973 17582250

Belgium/Luxemburg

☎ +32 (0) 2 620 01 01

Bosnia

☎ +387 (33) 636 285

Bulgaria

☎ +359 (2) 40 24 600

Croatia

☎ +385 (01) 3444 856

Cyprus

☎ +357 22575016

Cyprus Northern region

☎ +0392 22 72 367

Czech Republic

☎ +420 (0) 2 25 43 97 69

Denmark

☎ +45 35 15 80 40

Finland

☎ +358 (0)9 81 71 00 14

France

☎ +33 (0) 1 85 14 80 95

Germany

☎ +49 (0) 21 173 749 003

Greece

☎ +30 211 180 94 56

Hungary

☎ +36 (06) 1 429 2216

Iceland

☎ +354 555 3100

Israel

☎ +1 800250221

Italy

☎ +39 02 3859 1183

Jordan

☎ +962 6 582 0112-3-4-5

Kuwait

☎ +965 24833274

Lebanon

☎ +961 (01) 512002

Netherlands

☎ +31 (0) 78 201 8001

Norway

☎ +47 23 50 01 20

Poland

☎ +48 22 512 39 02

Portugal

☎ +351 21 060 8045

Qatar

☎ +974 4 4075048

☎ +974 4 4075000

Romania

☎ +40 214 255 566

Saudi-Arabia

☎ +966 3 8692244

Western Region - Jeddah

☎ +966 (0) 22565555

Central Region - Riyadh

☎ +966 (0) 12886808

Eastern Region - Al-Khobar

☎ +966 (0) 38940555

South Region - Abha

☎ +966 (0) 72376062

Slovakia

☎ +421 2 5011 2115

Slovenia

☎ +386 (01) 888 86 74

South Africa

☎ +27 (0) 11 089 1200

Spain

☎ + 34 913 754 176

Sweden

☎ +46 (0)8 5199 3097

Switzerland

☎ +41 (0) 22 567 5200

Tunisia

☎ +216 71716880

Turkey

☎ +90 216 337 22 55

UAE

☎ +971 4 353 4506

United Kingdom/Ireland

☎ +44 (0) 115 965 7449