

**POPIS**

GEL G002 – sáček 20 ml  
GEL G006 – lahvička 260 ml  
GEL G007 – láhev 1000 ml  
GEL G0064 – vak 5000 ml s prázdnou lahvičkou 260 ml  
GEL G0066 – kanystr 5000 ml s prázdnou lahvičkou 260 ml  
GEL G0066KIT – 6 kanystrů 5000 ml s 6 prázdnými lahvičkami 260 ml  
GEL G0067 – Dávkovací pumpa pro kanystr 5000 ml  
GEL G0068 – Dávkovací pumpa pro vak 5000 ml  
GEL G0084 – Průhledný, vak 5000 ml s prázdnou lahvičkou 260 ml  
GEL G008 – Průhledný, lahvička 260 ml  
GEL G009 – Průhledný, láhev 1000 ml  
GEL G010 – Průhledný, velmi hustý, balení 1000 ml

GEL ECO je kvalitní produkt s vynikajícím ultrazvukovým přenosem a stabilitou. Bezbarvé verze gelu (G008, G0084, G009 a G010) jsou vhodné i pro aplikace IPL. GEL ECO neoxiduje, neobsahuje mastné látky, nezanechává trvalé zbytky na elektrodách a je snadno odstranitelný. Obsahuje baktericidní Euxyl®K 100, jehož aktivními složkami jsou benzylalkohol, Methylchloroisothiazolinone (MS), Methylisothiazolinone (MI). Vyhovuje normě o biokompatibilitě ISO 10993-1:2003.

**IPOZOR!**

- Pouze k vnějšímu použití.
- Dodaný výrobek není sterilní.
- Nepoužívejte pro záznam EKG.
- Nenanášejte gel na podrážděné oči nebo pokožku, nebo pokožku poškozenou nebo u zranění.
- Výrobek může způsobit podráždění nebo zčervenání kůže zejména u alergiků.
- Nepolykejte.
- Při použití gelu pro aplikace IPL, mohou být poškozeny jeho vlastnosti: jednou použitý gel znovu nepoužívejte na jiných částech těla.
- Po použití dobře uzavřete.
- Nepoužívejte gel po "datu spotřeby" uvedeném na obalu.
- Vaky jsou opatřeny hrdlem pro snadné nalévání gelu. Po nalití vyměňte hrdlo za uzávěr pro správné uchování gelu.

**POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**

- **Oči:** V případě náhodného kontaktu s očima je pořádně vypláchněte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
- **Kůže:** Pokud dojde k podráždění kůže, důkladně omyjte vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Požítí:** Náhodné požití není většinou nebezpečné, ale pokud nastanou komplikace, poraďte se s lékařem.

**INSTRUKCE K POUŽITÍ**

- Osoby citlivé na MCI/MI musí používat ochranné rukavice.
- Očistěte a odmastěte kůži pacienta.
- Naneste požadované množství gelu ECO.
- Připojte a použijte přístrojem a sondy podle pokynů dodaných výrobcem.
- Po ukončení odstraňte papírem, TNT (netkanou textilií), nebo gázou navlhčenou vodou všechny zbytky gelu.
- Pro aplikaci IPL aplikujte rovnoměrně vrstvu gelu podle návodu dodaného s přístrojem IPL.

**ZÁRUKA - UPOZORNĚNÍ**

Výrobce garantuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 93/42/EHS a byl vyroben v souladu s postupy podle systému certifikace kvality společnosti podle ISO13485. Výrobce nenese odpovědnost a nepřijímá nároky za náklady na zdravotní péči, přímé nebo nepřímé škody způsobené chybějící funkcí nebo selháním uvedeného výrobku, jestliže není výrobek použit v souladu s návodem k použití. Pro zajištění kvality servisu doporučujeme hlásit jakoukoliv případnou poruchu nebo závadu výrobku. Datum použitelnosti je uvedeno na lahvičce.

**LIKVIDACE ODPADŮ**

Odpady pocházející ze zdravotnických zařízení se musí likvidovat v souladu s platnými předpisy. Gel je rozpustný ve vodě a neznečišťuje životního prostředí. Lahvička (obal) může být zlikvidována s tříděným odpadem.